

INSTRUCCIONES DE USO, limpieza y almacenamiento de los catéteres manométricos

INSTRUCCIONES DE USO

- Post-procedimiento los catéteres manométricos están contaminados con fluidos corporales.
- Sólo use catéteres que han sido limpiados y desinfectados de acuerdo a las siguientes instrucciones.
- Inspeccione el cateter antes de cada estudio por si tuviera algún daño o imperfección. No utilizar si está dañado.
- Los canales que no se utilizarán para las mediciones, deben ser llenado con agua y tapados con tapones luer o llave de paso.
- Este catéter sólo debe utilizarse bajo supervisión médica, por personal que haya recibido la formación adecuada en seguridad gastro-intestinal, la intubación, y en el desempeño de mediciones funcionales por perfusión.

QUÍMICOS DE LIMPIEZA / INSTRUCCIONES DE DESINFECCIÓN

Limpieza:

- Lavar el cateter en agua tibia con una solución con detergente enzimático.
- Lave todos los canales, incluyendo los canales no utilizados.
- Eliminar todas las materias extrañas. Limpie la superficie exterior.
- Enjuagar todos los canales con agua dulce limpia para quitar el detergente.
- Repita según sea necesario.
- Secar con aire todos los canales y eliminar exceso de agua de la superficie externa.

Desinfección química (desinfección de alto nivel):

- Remoje el catéter en una solución desinfectante (los tipos más comunes para los endoscopios, por ejemplo, Cidex-OPA (Johnson & Johnson), Sporox (Sultan Farmacias Inc.), Korsolex Extra (Bode Chemie GmbH & Co.) de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la solución.
- Con una jeringa introduzca desinfectante a través de todos los canales, incluyendo los canales no utilizados. Asegúrese de que el catéter este sumergido completamente en una solución desinfectante y todos los canales estén llenos de desinfectante.
- Precaución: El catéter esta fabricado con cloruro de polivinilo (PVC), policarbonato, acero inoxidable (Si tiene balloon también contiene látex o polietileno). Compruebe con el fabricante del desinfectante que se pueda utilizar con seguridad con estos materiales mencionados anteriormente.

Lavado y secado por soplado:

- Enjuagar y lavar cada canal con agua estéril para eliminar el desinfectante. Repita según sea necesario.
- Asegúrese de que todo el desinfectante este completamente eliminado.
- Seque todos los canales con aire y limpie toda la superficie externa.
- Dejar secar el cateter colgado al aire libre. No lo guarde en un envase cerrado. Precaución: No limpie o remoje el cateter en alcohol. No esterilizar en autoclave o con vapor a alta temperatura. El catéteres es de PVC.