

# cobas®

*Life needs answers*




## Accutrend Plus Guía Rápida Manejo

ACCUTREND, COBAS and  
LIFE NEEDS ANSWERS  
are trademarks of Roche.  
©2007 Roche

Roche Chile Limitada  
Av. Quilín 3750  
Macul - Santiago  
Tel. 441 3255 Fax 462 6695  
[www.roche.cl](http://www.roche.cl)




1

Coloque el instrumento sobre una superficie plana y sin vibraciones, a continuación enciéndolo presionando el boton .



2

Asegúrese de que la pantalla está iluminada. Compruebe la hora y fecha

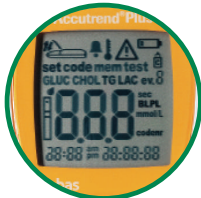

3

Al abrir un tubo nuevo de tiras reactivas, codifique el aparato. Si "code nr" parapadea, introduzca la tira de codificación según se indica. NO toque la zona con datos impresos, que hay detrás de la línea negra.



4

Con la tapa cerrada, introduzca la tira de codificación hasta el tope y luego retirela de inmediato.

5

Si la codificación se ha realizado correctamente, el instrumento emitirá un breve pitido. Si se ha producido un error, repita el proceso transcurridos unos segundos.

6

Extraiga una tira reactiva del tubo y ciérrelo de inmediato para evitar que el desecante pierda su efecto.



7

Sujete la tira reactiva según se indica e introdúzcala hasta el tope. Si la tira se ha introducido correctamente, el instrumento emitirá dos pitidos.

8

Abra la tapa de la cámara de medición.



9

Utilice el dispositivo de punción, para obtener una muestra de sangre del dedo o del lóbulo de la oreja.

10

*Para la aplicación de la muestra de sangre en el instrumento:*  
Aplique la gota de sangre directamente en la zona de aplicación amarilla de la tira reactiva, la zona amarilla debe quedar completamente cubierta.



NO toque la zona de aplicación con el dedo.  
NO aplicar una segunda gota.

La sangre debe aplicarse en un espacio de 15 segundos tras la punción para evitar un resultado incorrecto debido al inicio de la coagulación.

### USO PROFESIONAL

11

*Para la aplicación de la muestra de sangre fuera del instrumento:*  
Extraiga la tira reactiva y deje la tapa abierta. Aplique la sangre directamente desde el lugar de la punción. NO toque la zona de aplicación con la piel.



12

Vuelva a introducir la tira reactiva en el instrumento y cierre la tapa.



**Empieza la medición.  
Resultados disponibles en:**

- Glucosa: 12 segundos
- Colesterol: 180 segundos
- Triglicéridos: 174 segundos
- Lactato: 60 segundos

Una vez finalizada la medición, el resultado aparecerá en la pantalla. Las mediciones que están fuera del intervalo se indican con Hi (valor fuera del intervalo alto) o Lo (valor fuera del intervalo bajo).